



Kurzanleitung zum Softwareupdate des F200

USB-Stick Vorbereitung:

Um das Update auf den F200 aufzuspielen, benötigen Sie lediglich einen leeren USB-Stick der FAT32 formatiert sein muss und das dementsprechende Update-File.

Um den USB-Stick in FAT32 zu formatieren schliessen Sie bitte den USB-Stick am PC an und klicken anschließend per Rechtsklick auf das USB-Laufwerk und wählen „Formatieren“

Im neuen Fenster darauf achten das „FAT32“ ausgewählt ist, mit Klick auf „Starten“ wird der USB-Stick auf das gewünschte Format formatiert.

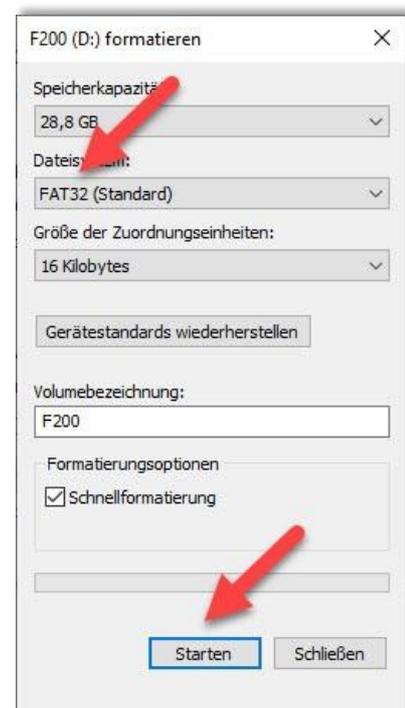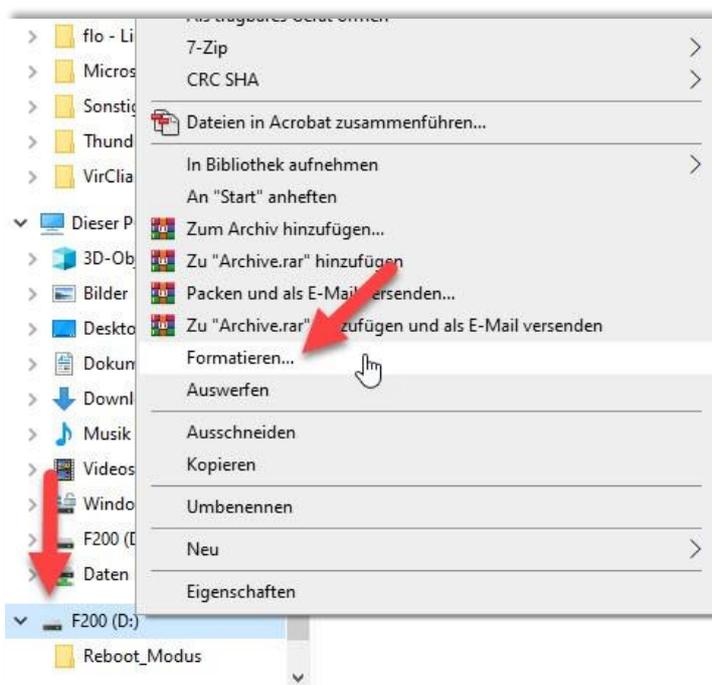


Zum Schluss müssen Sie nur noch die Datei  FluroTest_V001.048.bin auf ihren USB-Stick kopieren. Ihr USB-Stick ist nun bereit für das Update.


Vorgehensweise am Gerät:




Der vorbereitete USB-Stick wird jetzt in einen der vier freien Plätze am F200 gesteckt und das Gerät gestartet.

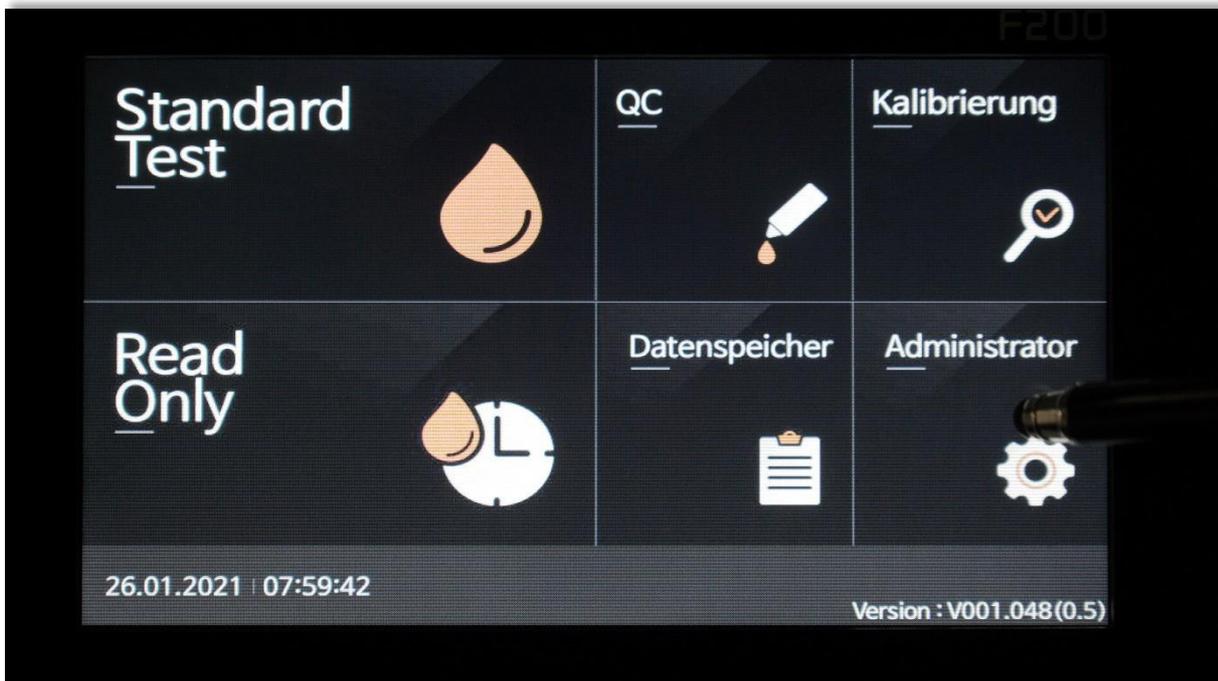


Wählen Sie Administrator.

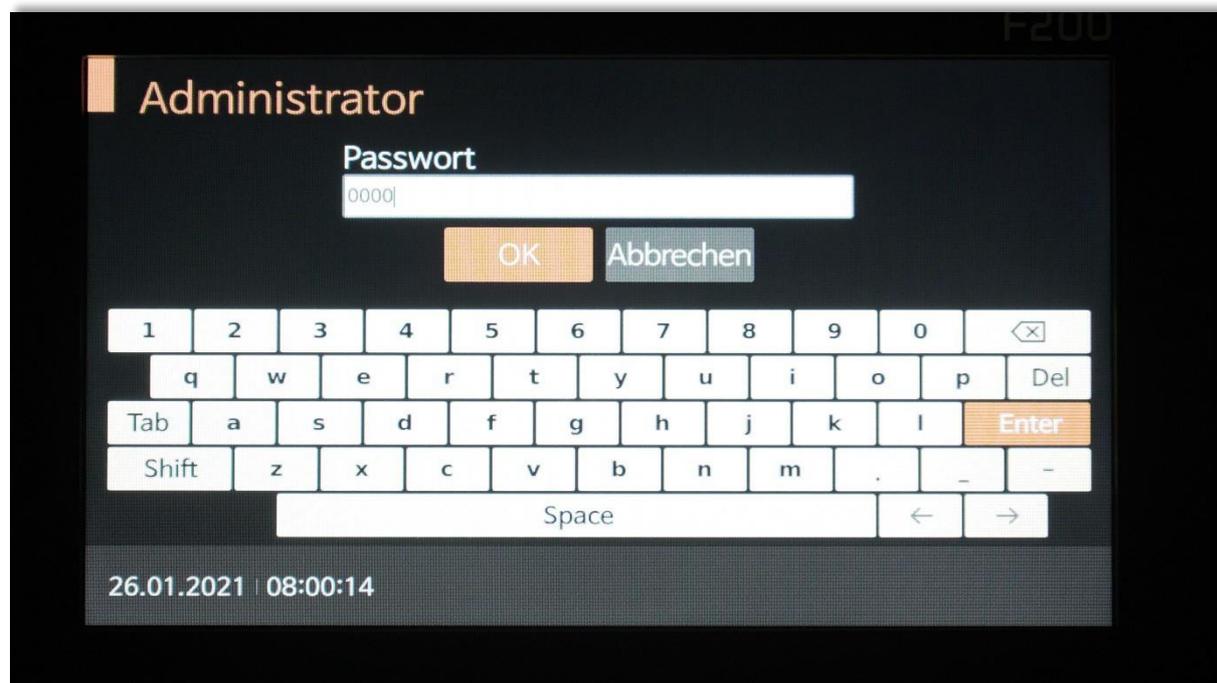

Im Feld Passwort tragen Sie 0000 ein und klicken auf OK.

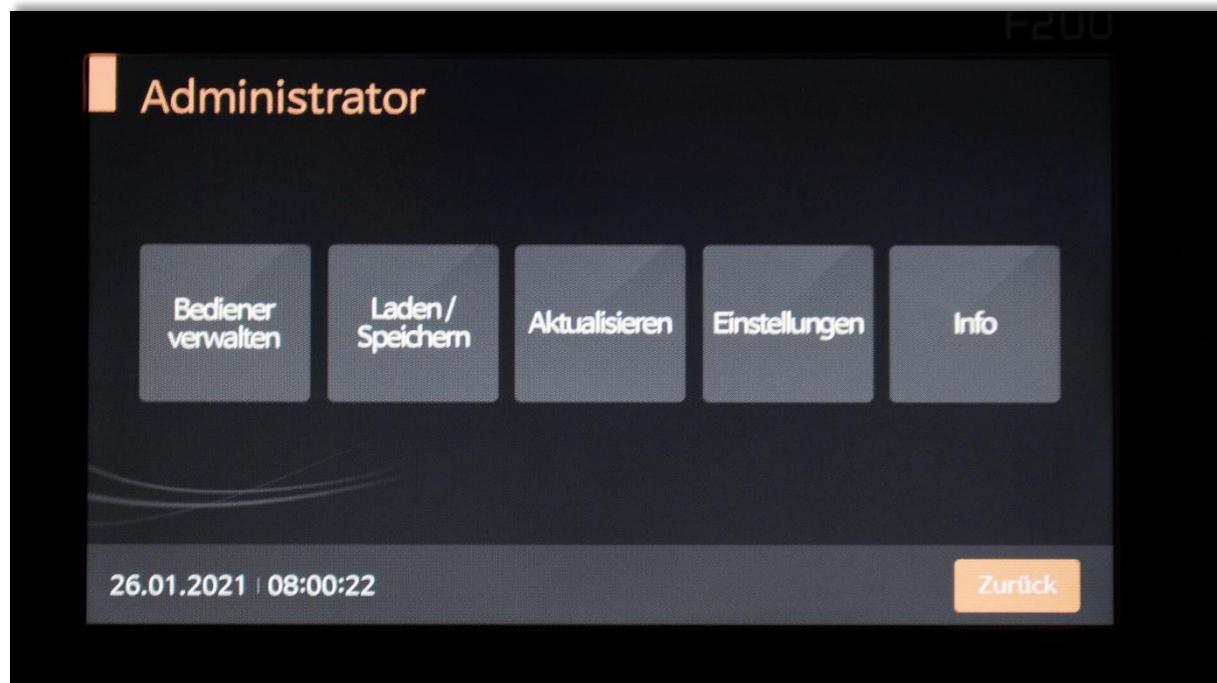

Klicken Sie bitte auf Aktualisieren.

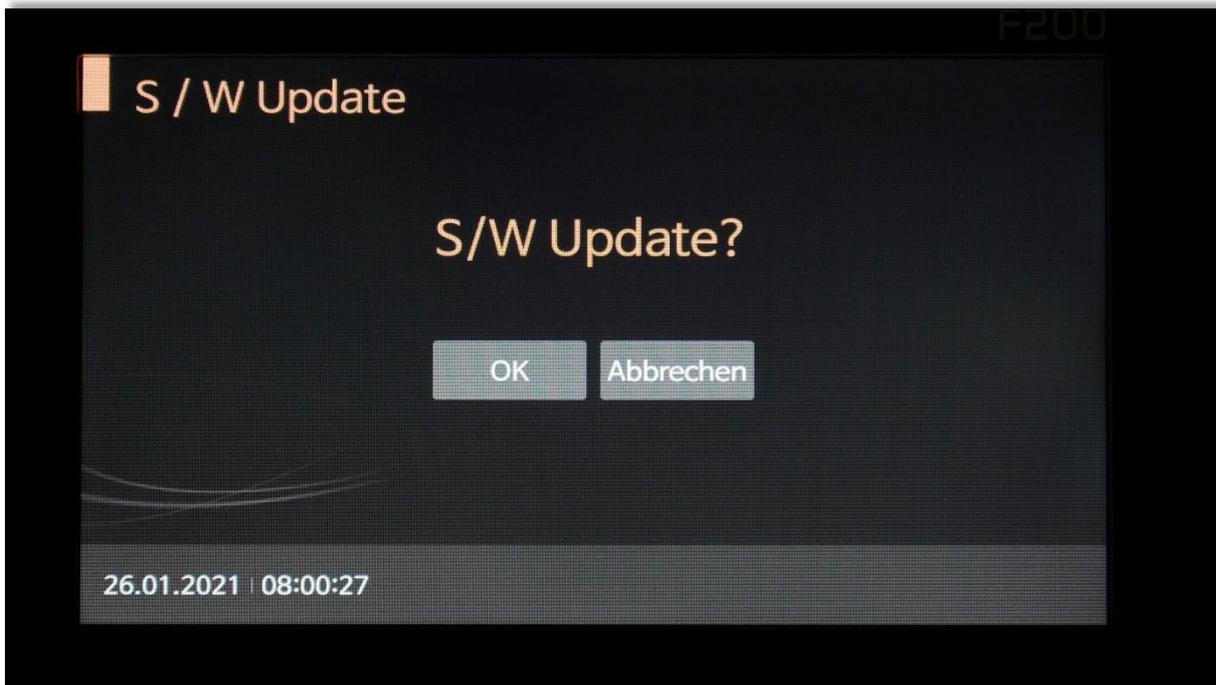

Bestätigen Sie bitte mit „ok“.



Nach ca. 90 Sekunden ist das Update installiert. Starten Sie bitte das Gerät neu und entfernen Sie den USB-Stick. Ihr Gerät ist jetzt auf den neusten Stand. Nach dem Neustart wird die neueste Softwareversion unten rechts in der Ecke des Bildschirms angezeigt.