


Guide rapide pour la mise à jour du logiciel du F200

Préparation de la clé USB:

Pour installer la mise à jour sur le F200, vous avez seulement besoin d'une clé USB vide formatée en FAT32 et du fichier de mise à jour correspondant

Pour formater la clé USB en FAT32, connectez la clé USB au PC et cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur le lecteur USB et sélectionnez «Formater»

Dans la nouvelle fenêtre, veiller à ce que «FAT32» soit sélectionné, puis cliquer sur «Démarrer» pour formater la clé USB au format souhaité.

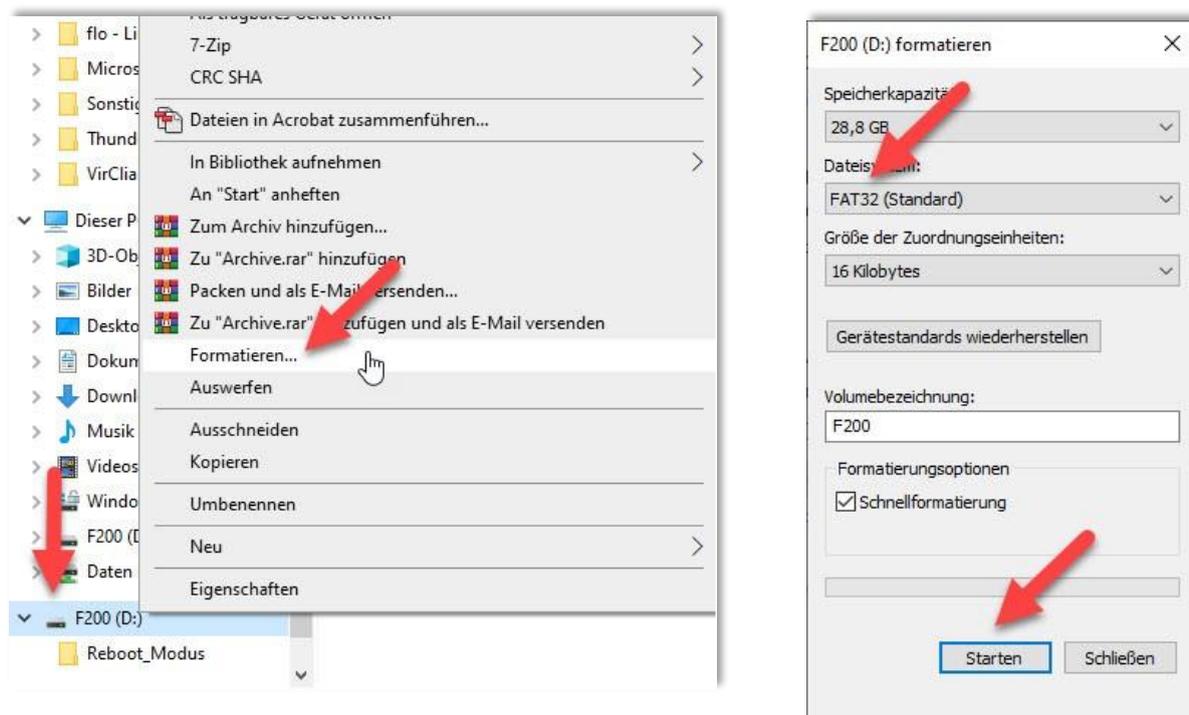


Pour finir, il ne vous reste plus qu'à copier le  **FluroTest_V001.048.bin** fichier sur votre clé USB. Votre clé USB est maintenant prête pour la mise à jour.


Procédure à suivre sur l'appareil:

La clé USB préparée est maintenant insérée dans l'un des quatre emplacements libres du F200 et l'appareil est démarré.




Veillez choisir l'Administrateur

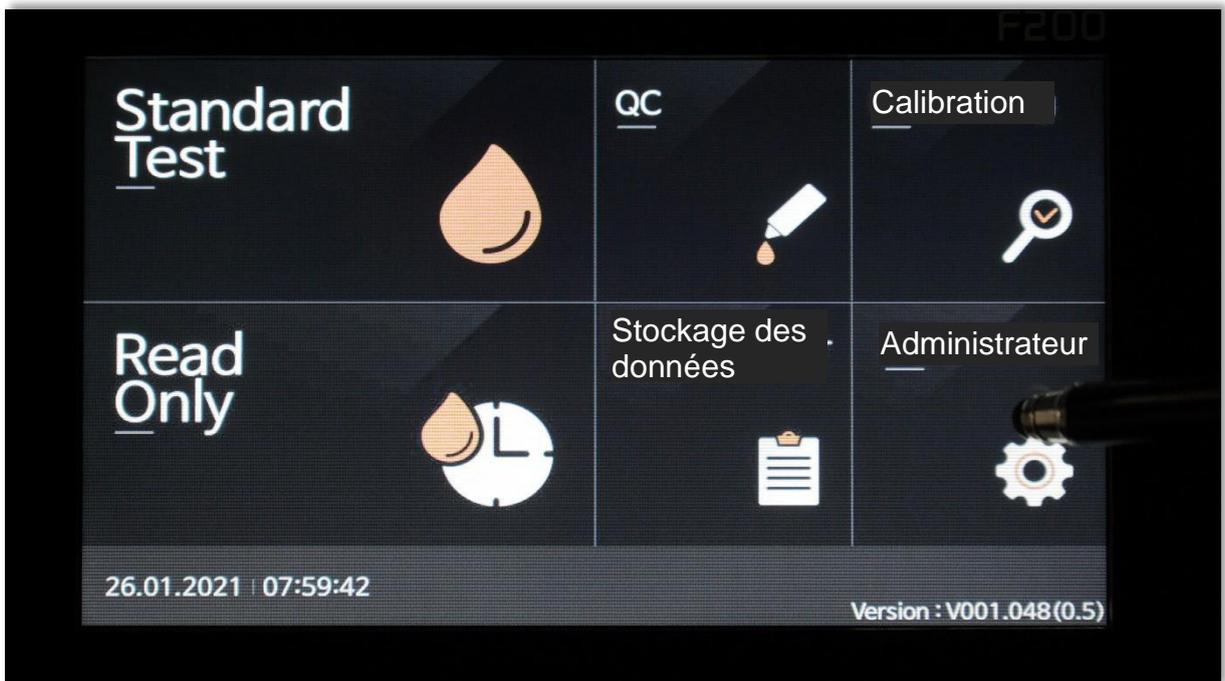

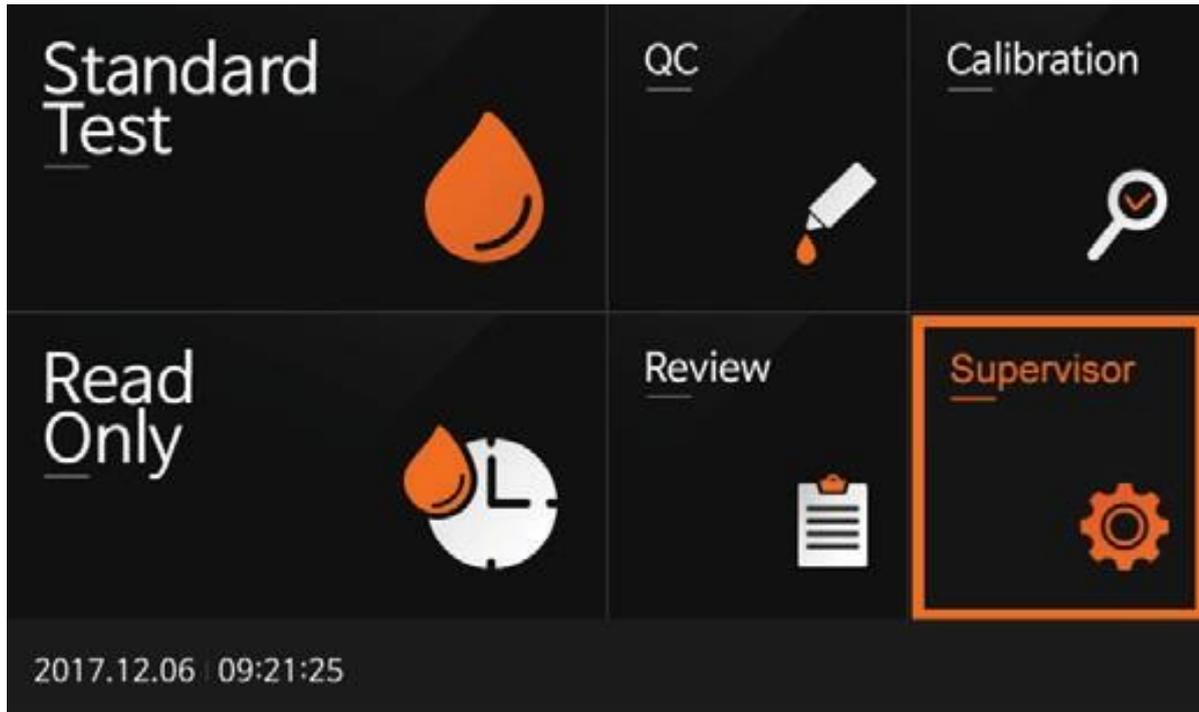



Dans le champ Mot de passe, veuillez saisir 0000 et cliquer sur OK

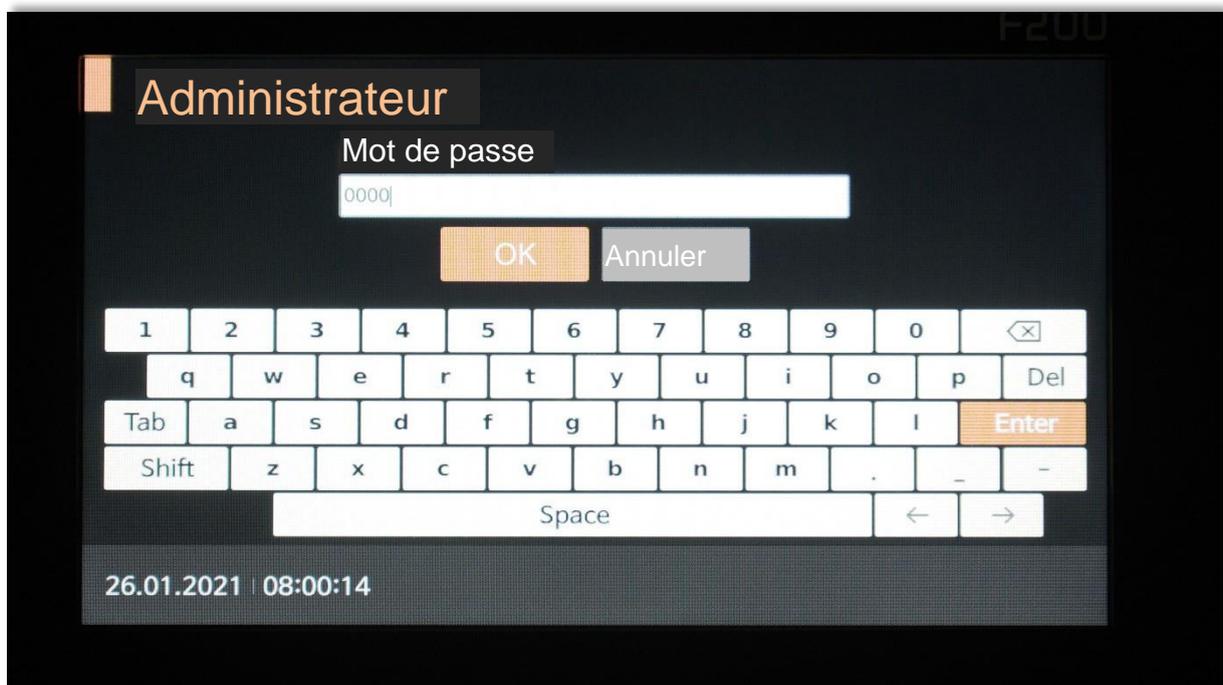





Veuillez cliquer sur Actualiser



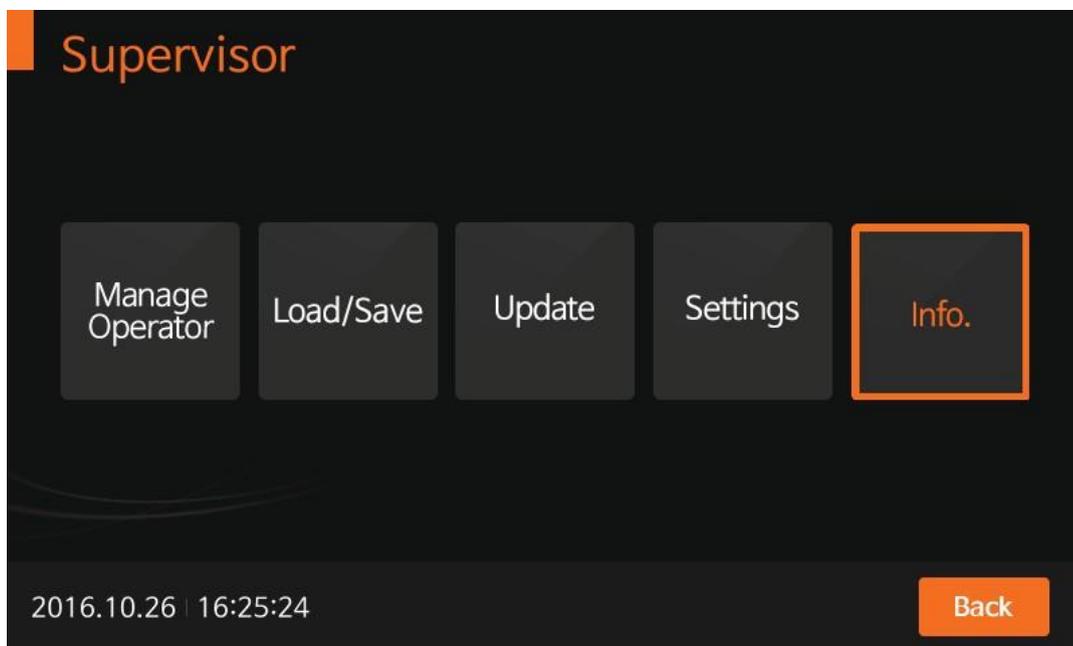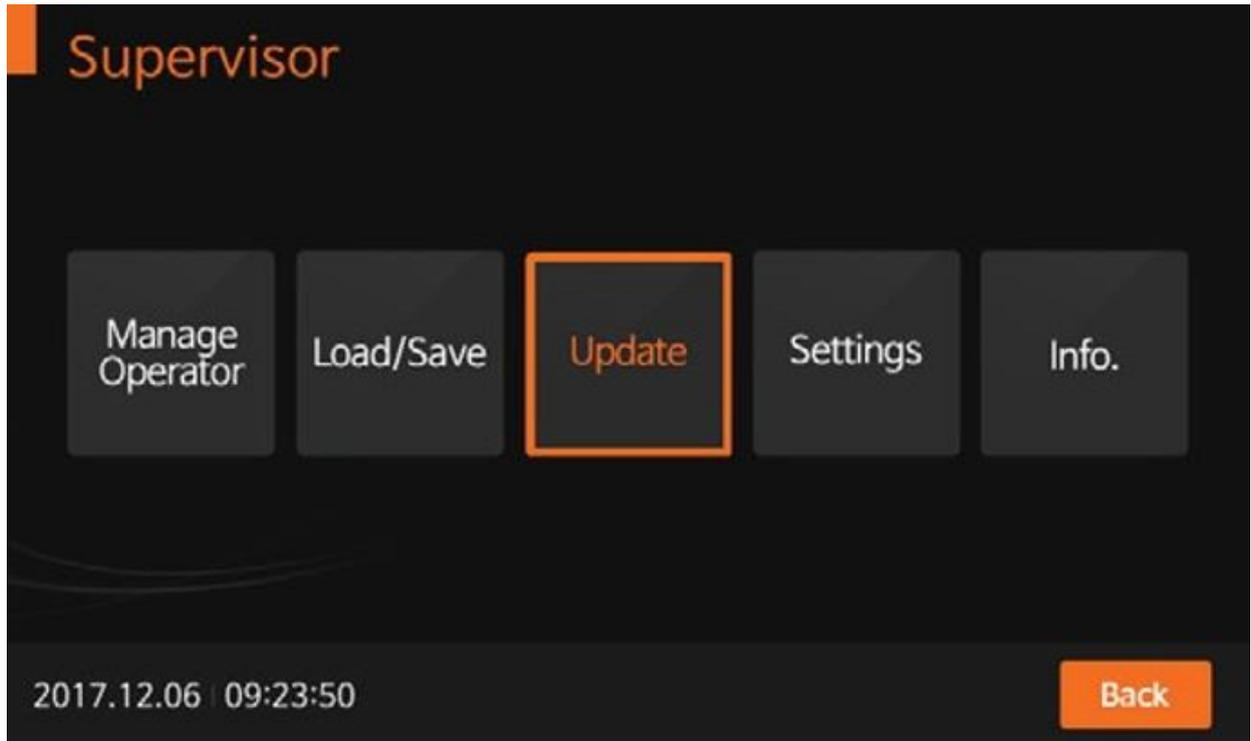

Veillez confirmer avec OK

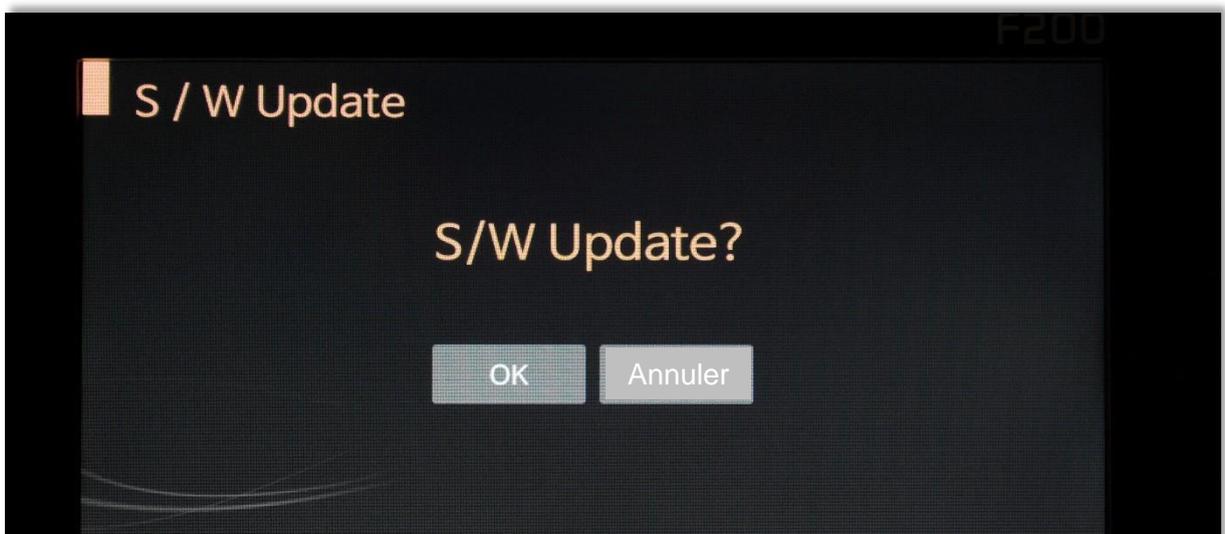

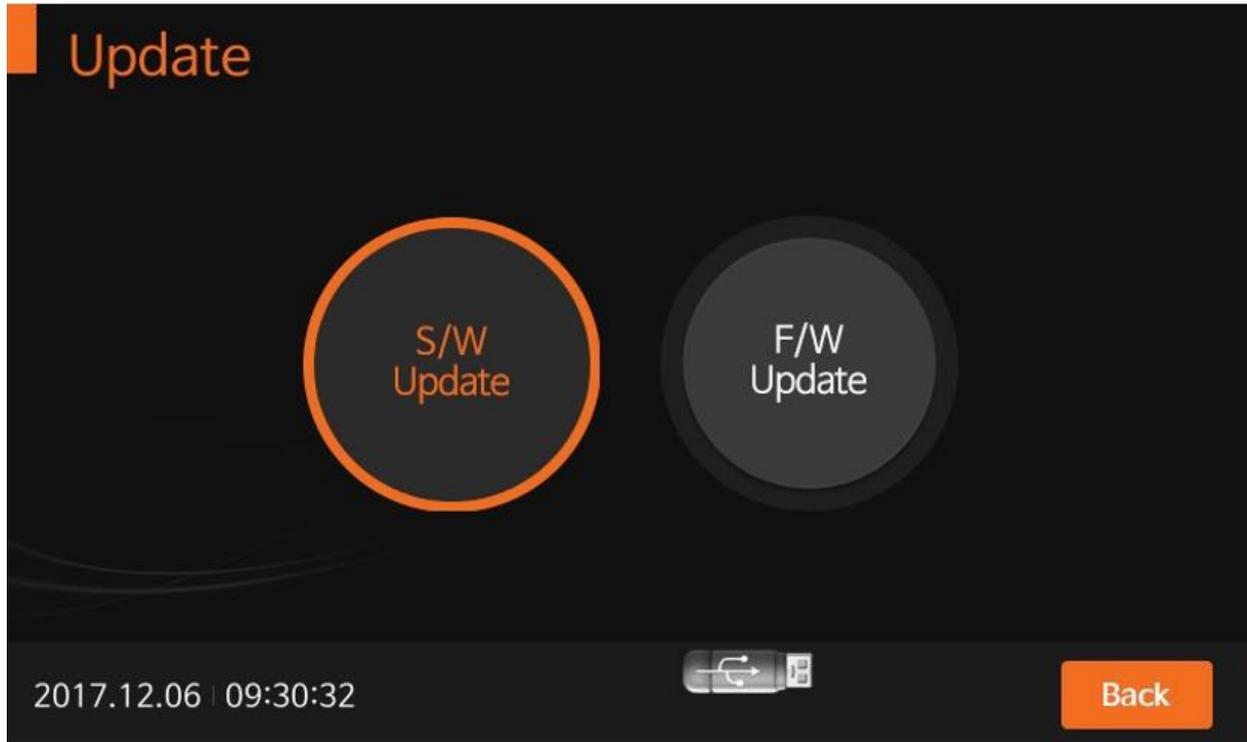

Après environ 90 secondes, la mise à jour est installée. Veuillez redémarrer l'appareil et retirer la clé USB. Votre appareil est maintenant à jour. Après le redémarrage, la dernière version du logiciel s'affiche en bas à droite dans le coin de l'écran.